

Θεραπεία τραυμάτων

Επιθέματα γάζας

Τα επιθέματα γάζας δεν έχασαν τη σπουδαιότητά τους στη σύγχρονη περιποίηση τραύματος. Διαθέτουν μεγάλη απορροφητικότητα και επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και ταυτόχρονα απαλά και ελαστικά. Χάρη σε αυτές τις ιδιότητές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλους τομείς στα πλαίσια της περιποίησης τραυμάτων και στον τομέα των εγχειρίσεων.

Κατά τη χρήση των επιθεμάτων γάζας ως άμεσο προστατευτικό κάλυμμα τραύματος πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιότητα που έχουν να κολλούν σε αυτό. Κυρίως σε περιπτώσεις επιδέσμων διαρκείας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν σε συνδυασμό με ενδιάμεσα επιθέματα φλικά προς το τραύμα ή αφού υγρανθούν.

Επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (φλίς)

Σε διάφορους τομείς τόσο σε εξωτερικά ιατρεία αλλά και στο νοσοκομείο τα διπλωμένα επιθέματα από φλις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αντί για το κλασικό επίθεμα γάζας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι ιδιότητες χρήσης του χρησιμοποιούμενου υλικού φλις είναι όμοιες με αυτές της γάζας.

Τα επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (φλίς) διαθέτουν για τον λόγο αυτό μια ανοιχτή δομή που μοιάζει με αυτή της γάζας και πληρούν έτσι τις απαιτήσεις τόσο επιτρέποντας την κυκλοφορία του αέρα όσο και χάρη στην γρήγορη απορρόφηση των υγρών, ακόμα και σε περίπτωση παχύρρευστων εκκρίσεων.

Απορροφητικά επιθέματα

Για την επιτάχυνση της θεραπείας πρέπει να απαιτείται μία τρισδιάστατη απορροφητική δράση από τα επιθέματα τραύματος, έτσι ώστε οι εκκρίσεις του τραύματος να μην διανέμονται μόνο επιφανειακά αλλά να απομακρύνονται από το τραύμα και να παραμένουν στο εσωτερικό του απορροφητικού σώματος. Εκτός από την αύξηση των στρώσεων στα υλικά επιθεμάτων γάζας είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση ειδικών απορροφητικών υλικών στο άμεσο κάλυμμα του τραύματος. Σύμφωνα με την αρχή αυτή δημιουργήθηκαν τα σύνθετα απορροφητικά επιθέματα.

Τολύπια και κομπρέσες

Τα τολύπια και οι κομπρέσες χρησιμεύουν για την παύση της αιμορραγίας, την απορρόφηση του αίματος και των μικροβίων, τον καθαρισμό και την απολύμανση τραυμάτων καθώς και άλλων σημείων του σώματος ή για την εφαρμογή φαρμάκων. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που τους προσδίδει χρηστική αξία είναι η δυνατότητα γρήγορης και μεγάλης απορρόφησης.

Για το λόγο αυτό η γάζα από καθαρό βαμβάκι που διαθέτει μεγάλη απορροφητικότητα αποτελεί το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται συχνότερα για την κατασκευή τολυπίων και σπόγγων. Επιπλέον διατίθενται και λωρίδες σπόγγων εμποτισμένες με αλοιφή.

Γάζα / Κυτταρίνη

Η γάζα που ακόμα και σήμερα θεωρείται κλασικό υλικό για την κατασκευή επιθεμάτων εξαιτίας των πολλών χρηστικών δυνατοτήτων της, προτιμάται για την δημιουργία ατομικών επιδέσμων και επιθεμάτων.

Η κυτταρίνη αποτελεί χάρη στην μεγάλη απορροφητικότητά της ένα απαραίτητο και ταυτόχρονα οικονομικό απορροφητικό υλικό για τη φροντίδα των ασθενών.

Επιθέματα με αλοιφή

Τα επιθέματα με αλοιφή συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα φιλικά προς το τραύμα υλικά επιδέσμων. Δεν κολλούν στο τραύμα και προστατεύουν έτσι τον συνδετικό ιστό και το νεαρό επιθήλιο. Επιπρόσθετα επιτρέπουν στο τραύμα να διατηρήσει την υγρασία του για περισσότερο, βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας της περιοχής του τραύματος και προλαμβάνουν τη συρρίκνωση της ουλής.

Ειδικά επιθέματα

Η φαρμακολογική αξία ενός επιθέματος τραύματος εξαρτάται από την απορροφητικότητά του. Με την απορρόφηση περιττών εκκρίσεων καθαρίζεται το τραύμα με αποτέλεσμα να διατηρείται καθαρό. Πέραν τούτου το επίθεμα χρησιμεύει ως μηχανική προστασία των τραυμάτων, δηλαδή εμποδίζει τα μικρόβια, ανακόπτει την απώλεια σωματικών υγρών και εμποδίζει το στέγνωμα της επιφάνειας του τραύματος.



Αυτοκόλλητα επιθέματα

Τα αυτοκόλλητα επιθέματα με απορροφητικό προστατευτικό κάλυμμα τραύματος είναι ιδανικά για τη γρήγορη και υγιεινή περιποίηση των μικροτραυμάτων. Διατίθενται διαφορετικά αυτοκόλλητα επιθέματα ανάλογα με τον τύπο του δέρματος.

Για την αποστειρωμένη περιποίηση μικροτραυμάτων και για τη μετεγχειρητική περιποίηση των τραυμάτων που συνοδεύονται από εκκρίσεις ενδείκνυνται οι αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Cosmopor από απαλό μη υφασμένο υλικό (φλις) και Hydrofilm Plus από διάφανη μεμβράνη. Το Hydrofilm, χωρίς προστατευτικό κάλυμμα τραύματος, τοποθετείται σε στεγνά τραύματα κατά την πρωτογενή τους θεραπεία ως προστασία από δευτερογενείς μολύνσεις. Το επίθεμα στερέωσης βελόνης ολοκληρώνει την σειρά των αποστειρωμένων αυτοκόλλητων επιδέσμων.

Επίδεσμοι στερέωσης

Στα πλαίσια της θεραπείας τραυμάτων ο επίδεσμος στερέωσης πρέπει να επιτελεί πολλές ταυτόχρονες λειτουργίες: πρέπει να αποτρέπει την χαλάρωση και τη μετατόπιση του επιθέματος τραυμάτων, αφού οι χαλαρά στερεωμένες στο τραύμα κομπρέσες είναι πιθανό να προκαλέσουν ερεθισμούς και διαταραχές στην θεραπεία του τραύματος. Η ομοιόμορφη πίεση που ασκείται από το επίπεδο επίθεμα σε συνδυασμό με τον επίδεσμο στερέωσης, είναι σε θέση να αποτρέψει την εμφάνιση οιδήματος στο άκρο του τραύματος. Επιπλέον ο επίδεσμος στερέωσης προστατεύει το τραύμα από ρύπους και βακτηρίδια ενώ το προστατευτικό του στρώμα προστατεύει από πίεση και χτυπήματα.

Δικτυωτοί σωληνωτοί και σωληνωτοί επίδεσμοι

Μια επιπλέον δυνατότητα για τη στερέωση επιθεμάτων αποτελούν οι δικτυωτοί και σωληνωτοί επίδεσμοι. Ο απόλυτα ελαστικός δικτυωτός σωληνωτός επίδεσμος Stürla-fix μπορεί να εφαρμοστεί με λίγες κινήσεις σε όλα τα σημεία του σώματος. Τα επιθέματα στερεώνονται με ασφάλεια χωρίς να είναι αναγκαία η επικόλληση ή κάποιος άλλος τρόπος στερέωσής τους. Ο δικτυωτός επίδεσμος Stürla, χωρίς ραφές δεν είναι κατάλληλος μόνο για τη στερέωση επιδέσμων. Το υλικό είναι ιδανικό και για χρήση ως επίδεσμος έκτασης και ακινητοποίησης καθώς και ως υπόστρωμα ή για την κάλυψη επιδέσμων ψευδαργύρου ή γυψεπιδέσμων. Ο φιλικός προς το δέρμα δικτυωτός επίδεσμος Coverflex από μεταξούριδες συμπαγές υλικό, χρησιμοποιείται κυρίως κατά τη θεραπεία του ατοπικού εκζέματος. Αν με τον επίδεσμο στερέωσης επιδιώκεται ταυτόχρονα η στήριξη και η ανακούφιση, τότε ο κατάλληλος επίδεσμος είναι ο σωληνωτός επίδεσμος διαρκούς ελαστικότητας Lastogrip.

Ταινίες στερέωσης

Οι ταινίες στερέωσης αποτελούν απαραίτητα βοηθητικά μέσα σε πολλούς ιατρικούς τομείς. Οι ταινίες ραμμάτων είναι κατάλληλες για τη στερέωση των άκρων του τραύματος ή για τη σταθεροποίηση καινούργιων ραμμάτων. Για τη στερέωση ή την κάλυψη επιδέσμων, για τη στερέωση οργάνων μέτρησης, καθετήρων κλπ. Χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάλογα με τις ενδείξεις και τον τύπο του δέρματος διάφορα είδη ταινιών στερέωσης.

Η σειρά Omni περιλαμβάνει αυτοκόλλητες ταινίες από τέσσερα διαφορετικά υλικά: ύφασμα, μετάξι και φλις καθώς και πορώδη, διάφανη μεμβράνη. Ως συγκολλητικές ουσίες χρησιμοποιούνται υποαλλεργικές κόλλες από συνθετικό καουτσούκ και πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό.

Γάζες υφασμένες	Σελ. 10
Επιθέματα από μη υφασμένο υλικό	Σελ. 12
Επιθέματα απορροφητικά	Σελ. 13
Τολύπια γάζας	Σελ. 15
Κομπρέσες	Σελ. 16
Ταμπόν	Σελ. 17
Γάζες ταμποναρίσματος	Σελ. 18
Γάζα, Κυτταρίνη	Σελ. 19
Επιθέματα με αλοιφή	Σελ. 20
Επιθέματα ειδικά	Σελ. 21
Επιθέματα αυτοκόλλητα	Σελ. 27
Επίδεσμοι γάζας	Σελ. 29
Επίδεσμοι στερέωσης	Σελ. 30
Σωληνωτοί επίδεσμοι	Σελ. 32
Δικτυωτοί σωληνωτοί επίδεσμοι	Σελ. 35
Ζώνες στήριξης	Σελ. 36
Ταινίες στερέωσης	Σελ. 36

Γάζες υφασμένες

Sterilux® ES



Γάζα υφασμένη

απορροφητική, βαμβακερή σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079, με 17 κλωστές/cm², με κομμένες άκρες και διπλωμένη. Μπορεί να ξεδιπλωθεί πολλές φορές όταν η χρήση απαιτεί μεγαλύτερο μέγεθος χωρίς να ξεφτίζουν τα νήματα.

Χρησιμοποιείται για τη γενική περιποίηση των τραυμάτων ή ως τολύπιο ή σπόγγος σε μικρές εγχειρίσεις.

Η ατομική συσκευασία είναι στη μια πλευρά χαρτί και στην άλλη διάφανη μεμβράνη. Ειδικά διαμορφωμένη πλαστική συσκευασία (blister), η οποία επιτρέπει τον εμπορισμό της γάζας μέσα στην ίδια την συσκευασία.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
αποστειρωμένη <u>17 κλωστών,</u> σε συσκευασία ατομική				
12πλη	15x15 cm	418 547	12x1 τεμάχια	10
16πλη	15x30 cm	418 548	12x1 τεμάχια	10
	17x30 cm	418 549	12x1 τεμάχια	10
	36x40 cm	418 550	10x1 τεμάχια	10



αποστειρωμένη

17 κλωστών,
σε συσκευασίες
2 τεμαχίων

8πλη	5x5 cm	418 551	25x2 τεμάχια	12
	7,5x7,5 cm	418 554	25x2 τεμάχια	12
	10x10 cm	418 557	25x2 τεμάχια	8
	10x20 cm	418 559	25x2 τεμάχια	8



μη αποστειρωμένη

σε χάρτινη
συσκευασία

17 κλωστών

8πλη

5x5 cm	418 800	100 τεμάχια	30
5x7,5 cm	418 801	100 τεμάχια	10
7,5x7,5 cm	418 802	100 τεμάχια	10
7,5x10 cm	418 803	100 τεμάχια	10
10x10 cm	418 804	100 τεμάχια	10
10x20 cm	418 805	100 τεμάχια	10



Mulpa®

Επιθέματα μεγάλου μεγέθους και λωρίδες επιθεμάτων

από γάζα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079-VM 20, 20 κλωστών, με προστατευμένες γωνίες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεδιπλωμένα χωρίς να εμφανίζονται ενοχλητικά νήματα. Διατίθενται σε αποστειρωμένη χάρτινη συσκευασία.

Για τη γενική περιποίηση τραύματος ιδιαίτερα για μεγάλα τραύματα.

Mulpa® Επιθέματα μεγάλου μεγέθους:

Δυνατότητες χρήσης:

Βασική μορφή: 16πλό, 10x20
1x ξεδιπλωμένο = 8πλό, 20x20
2x ξεδιπλωμένο = 4πλό, 20x40

Mulpa® Λωρίδες επιθεμάτων:

Δυνατότητες χρήσης:

Βασική μορφή: 32πλό, 10x10
1x ξεδιπλωμένο = 16πλό, 10x20
2x ξεδιπλωμένο = 8πλό, 10x40
3x ξεδιπλωμένο = 4πλό, 10x80



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
επιθέματα μεγάλου μεγέθους	10x20 cm	403 847	100 τεμάχια	5
λωρίδες επιθεμάτων	10x10 cm	400 151	50 τεμάχια	10

Peha®

Επιθέματα με οπή

από γάζα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079- VM 17, 17 κλωστών, με οπή σχήματος Y.

Για την περιποίηση τραυμάτων σε περιπτώσεις διασωλήνωσης, τραχειοστομίας και εκτάσεων.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
αποστειρωμένα σε συσκευασίες 2 τεμαχίων	7,5x7,5 cm 10x10 cm	401 503 401 505	25x2 τεμάχια 20x2 τεμάχια	10 10

Γάζες από μη υφασμένο υλικό



Medicomp®

Επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (φλις)

που έχουν δομή γάζας. Αποτελείται κατά 70% από ίνες κυτταρίνης και 30% από ίνες πολυεστέρα. Δε φέρει συγκολλητικό μέσο και φθορίζον λευκαντικό μέσο. 4πλό.

Για τη γενική περιποίηση τραυμάτων, ως τολύπια και ως κομπρέσες για επεμβάσεις που γίνονται είτε σε εξωτερικά ιατρεία, είτε σε νοσοκομείο.

Medicomp® extra: 6πλό. Ιδιαίτερα απορροφητικό χάρη σε δύο επιπλέον στρώματα.

Medicomp® Drain: 6πλό. Ιδιαίτερα απορροφητικό χάρη σε δύο επιπλέον στρώματα. Φέρει τομή σχήματος Y. Για την περιποίηση τραυμάτων σε περιπτώσεις διασωλήνωσης, τραχειοστομίας και εκτάσεων.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Medicomp® αποστειρωμένο σε συσκευασίες 2 τεμαχίων	5x5 cm 7,5x7,5 cm 10x10 cm 10x20 cm	421 721 421 723 421 725 421 727	25x2 τεμάχια 25x2 τεμάχια 25x2 τεμάχια 25x2 τεμάχια	24 12 8 8
Μεγάλες συσκευασίες 2 ή 5 τεμαχίων	5x5 cm 7,5x7,5 cm 10x10 cm	411 531 411 233 411 533 411 235	75x5 τεμάχια 100x2 τεμάχια 50x5 τεμάχια 100x2 τεμάχια	6 6 6 5
		411 535	50x5 τεμάχια	5

μη αποστειρωμένο



μη αποστειρωμένο	5x5 cm 7,5x7,5 cm 10x10 cm 10x20 cm	421 821 421 823 421 825 421 827	100 τεμάχια 100 τεμάχια 100 τεμάχια 100 τεμάχια	24 12 12 12
-------------------------	--	--	--	----------------------

Medicomp® extra αποστειρωμένο σε συσκευασίες 2 τεμαχίων

Medicomp® extra αποστειρωμένο σε συσκευασίες 2 τεμαχίων	5x5 cm 7,5x7,5 cm 10x10 cm 10x20 cm	421 731 421 733 421 735 421 737	25x2 τεμάχια 25x2 τεμάχια 25x2 τεμάχια 25x2 τεμάχια	24 12 8 6
--	--	--	--	--------------------

μη αποστειρωμένο

μη αποστειρωμένο	5x5 cm 7,5x7,5 cm 10x10 cm 10x20 cm	421 831 421 833 421 835 421 837	100 τεμάχια 100 τεμάχια 100 τεμάχια 100 τεμάχια	24 12 12 6
-------------------------	--	--	--	---------------------

Medicomp® Drain αποστειρωμένο σε συσκευασίες 2 τεμαχίων

Medicomp® Drain αποστειρωμένο σε συσκευασίες 2 τεμαχίων	7,5x7,5 cm 10x10 cm	421 533 421 535	25x2 τεμάχια 25x2 τεμάχια	12 8
--	------------------------	--------------------	------------------------------	---------






Eycopad®

Επιθέματα οφθαλμικά

από καθαρό βαμβάκι με επένδυση από μουσελίνα, ιδιαίτερα απαλά και απορροφητικά, προσφέρουν άνεση επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για την θεραπεία τραυμάτων του ματιού.

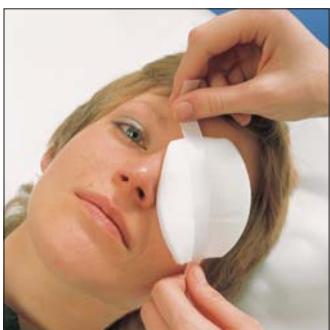

Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία	56x70 cm	415 540	25 τεμάχια	12
	70x85 cm	417 540	25 τεμάχια	12
<u>μη αποστειρωμένο</u>	56x70 cm	415 620	5 τεμάχια	105
		415 650	50 τεμάχια	15
	70x85 cm	417 620	5 τεμάχια	60
		417 650	50 τεμάχια	15



Fil-Zellin®

Επιθέματα γενικής χρήσης με κάλυμμα

από μη υφασμένο υλικό (φλις), φιλικό προς το τραύμα και απορροφητικό σώμα που αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις λευκασμένης κυτταρίνης για επιθέματα. Με εσωτερική καπιτονέ επένδυση που συνδέει τα διαφορετικά στρώματα, πράγμα που δίνει στο επίθεμα τη δυνατότητα να κοπεί σε διάφορα μεγέθη χωρίς να χαθεί η συνοχή των στρώσεων του υλικού.

Γενικής χρήσης για την περιποίηση τραυμάτων που συνοδεύονται από εκκρίσεις καθώς και στεγνών τραυμάτων. Χρησιμοποιείται ως υλικό για επιθέματα με αλοιφή ή υγρά επιθέματα.

Fill-Zellin®-Box: Dispenser για τα ρολά Fill-Zellin 10 cm x 10m. Προστατεύει τα τολύπια από τους ρύπους και εξασφαλίζει μια απλή και γρήγορη λήψη.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Fill-Zellin®	10 cm	456 112	ρολό 10 m	24
	15 cm	456 113	ρολό 10 m	16
	30 cm	456 114	ρολό 10 m	8
Fill-Zellin®-Box		996 854	1 Box	1

Επιθέματα απορροφητικά

Zetuvit®



Επιθέματα απορροφητικά

από τέσσερα στρώματα που προσαρμόζονται το ένα πάνω στο άλλο: διπλή επίστρωση μη υφασμένου υλικού (φλις) που προσφέρει μεταξένια απαλότητα, απορροφητικό σώμα από απαλό τολύπιο κυτταρίνης, υφασμάτινο στρώμα για τη διανομή των εκκρίσεων και μια επίστρωση μη υφασμένου (φλις) πολυπροπυλενίου για την απώθηση της υγρασίας στο πίσω μέρος του επιθέματος ως προστατευτικό στρώμα από μολύνσεις.

Για την περιποίηση τραυμάτων που συνοδεύονται από έντονες εκκρίσεις σε όλους τους ιατρικούς τομείς. Χρησιμεύουν ως προστατευτικό κάλυμμα τραυμάτων.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία	10x10 cm	413 701	25 τεμάχια	10
	10x20 cm	413 702	25 τεμάχια	10
	13,5x25 cm	413 705	10 τεμάχια	6
	20x20 cm	413 703	15 τεμάχια	9
	20x40 cm	413 704	5 τεμάχια	9
<u>μη αποστειρωμένο</u>	10x10 cm	413 801	30 τεμάχια	12
	10x20 cm	413 802	30 τεμάχια	12
	13,5x25 cm	413 805	30 τεμάχια	6
	20x20 cm	413 803	30 τεμάχια	8
	20x40 cm	413 804	30 τεμάχια	4

Zetuvit® E



Επιθέματα απορροφητικά

με κάλυμμα από φλις πολυπροπυλενίου που δεν κολλάει, απορροφητικό σώμα από απαλό τολύπιο κυτταρίνης, υφασμάτινο στρώμα για τη διανομή των εκκρίσεων και μια επίστρωση μη υφασμένου (φλις) πολυπροπυλενίου για την απώθηση της υγρασίας στο πίσω μέρος του επιθέματος ως προστατευτικό στρώμα από μολύνσεις.

Για την περιποίηση τραυμάτων που συνοδεύονται από έντονες εκκρίσεις σε όλους τους ιατρικούς τομείς. Χρησιμεύουν ως προστατευτικό κάλυμμα τραυμάτων.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία	10x10 cm	413 770	25 τεμάχια	10
	10x20 cm	413 771	25 τεμάχια	10
	15x20 cm	413 772	25 τεμάχια	6
	15x25 cm	413 773	10 τεμάχια	10
	20x20 cm	413 774	15 τεμάχια	9
	20x25 cm	413 775	15 τεμάχια	6
	20x40 cm	413 776	10 τεμάχια	6
<u>μη αποστειρωμένο</u>	10x10 cm	413 860	50 τεμάχια	20
	10x20 cm	413 861	50 τεμάχια	12
	15x20 cm	413 862	50 τεμάχια	8
	15x25 cm	413 863	50 τεμάχια	6
	20x20 cm	413 864	50 τεμάχια	6
	20x25 cm	413 865	50 τεμάχια	4
	20x40 cm	413 866	30 τεμάχια	4



Pagalong®

Τολύπια γάζας κωνικά

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079-VM 20, από γάζα 20 κλωστών, με κωνική μορφή.

Χρησιμοποιούνται σε ωτορινολαρυγγικές επεμβάσεις.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μη αποστειρωμένο</u>				
	Μέγεθος μικρό Μέγεθος μεγάλο	400 259 400 260	500 τεμάχια 500 τεμάχια	6 6



Pagasling®

Τολύπια γάζας στρογγυλά

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079-VM 20, 20 κλωστών. Διαθέτουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα.

Χρησιμοποιούνται για την αιμόσταση και τον καθαρισμό του τραύματος καθώς και για απολύμανση μεγάλων επιφανειών δέρματος.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> σε μέγεθος:				
δαμάσκηνου (No. 3)	20 x 20 cm	481 274 481 284 481 414	4 τεμάχια 5 τεμάχια 20 τεμάχια	240 120 16
αβγού (No. 4) extra large (No. 5)	24 x 24 cm 48 x 24 cm	481 409 481 400	10 τεμάχια 10 τεμάχια	16 16

μη αποστειρωμένο
σε μέγεθος:
φουντουκιού (No. 1)
καρυδιού (No. 2)
δαμάσκηνου (No. 3)
αβγού (No. 4)
extra large (No. 5)
γροθιάς (No. 6)

Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μη αποστειρωμένο</u> σε μέγεθος:				
φουντουκιού (No. 1)	7 x 7 cm	481 292	1000 τεμάχια	6
καρυδιού (No. 2)	12 x 12 cm	481 293	1000 τεμάχια	6
δαμάσκηνου (No. 3)	20 x 20 cm	481 294	2x500 τεμάχια	1
αβγού (No. 4)	24 x 24 cm	481 299	4x250 τεμάχια	1
extra large (No. 5)	48 x 24 cm	400 131	4x250 τεμάχια	1
γροθιάς (No. 6)	47 x 40 cm	481 295	4x125 τεμάχια	1

Κομπρέσες



Pur-Zellin®

Κομπρέσες σε ρολό - διάτρητες

έτοιμες για χρήση. Κατασκευάζονται από λευκασμένη κυτταρίνη επιθεμάτων. Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του δέρματος πριν από τη χορήγηση ένεσης και έγχυσης, ως απορροφητικό προστατευτικό υλικό για μικρούς τραυματισμούς, για την τοπική απολύμανση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και για πολλές εργαστηριακές εργασίες.

Pur-Zellin®-Box: Πλαστικό dispenser για τις κυλινδρικές κομπρέσες από κυτταρίνη. Προστατεύει τις κομπρέσες από τους ρύπους και εξασφαλίζει μια απλή και γρήγορη λήψη.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u>	4x5 cm	143 252	2 ρολά από 500 κομπρέσες	6
<u>μη αποστειρωμένο</u>	4x5 cm	143 212	2 ρολά από 500 κομπρέσες	6
Pur-Zellin®-Box		996 857	1 τεμάχιο	1



Con-Zellin®

Κομπρέσες εμποτισμένες σε αλκοόλη

κατασκευάζονται από απαλό μη υφασμένο υλικό (φλις), σταθεροποιούνται με υφασμάτινη επένδυση, έτοιμες προς χρήση εμποτισμένες με 0,5 ml ισοπροπυλικής αλκοόλης (70% V/V), αποστειρωμένες.

Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του δέρματος πριν από τη χορήγηση ένεσης.

Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία	60x30 mm	999 980	100 τεμάχια	70




Celluron®

Ταμπόν κυλινδρικά βάμβακος

για οδοντιατρική χρήση από καθαρό βαμβάκι και λευκασμένη κυτταρίνη επιδέσμων. Τα υλικά αυτά είναι τυλιγμένα σε λεπτές στρώσεις, η εξωτερική στοιβάδα είναι σταθεροποιημένη με συγκολλητικό υλικό. Διαθέτουν ιδιαίτερη απορροφητικότητα. Διατίθενται και σε μίγμα βαμβακιού-βισκόζης.

Χρησιμοποιείται ως απορροφητικό υλικό για οδοντιατρική χρήση, έτσι ώστε να διατηρείται στεγνό το σημείο όπου λαμβάνει χώρα η θεραπευτική αγωγή.

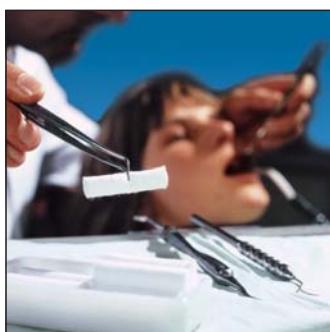

Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
μήκος 38-40 mm				
<u>καθαρό βαμβάκι</u>				
διάμετρος 8 mm	Μέγεθος 1	431 301	1000 τεμάχια	26
διάμετρος 10 mm	Μέγεθος 2	431 302	1000 τεμάχια	18
διάμετρος 12 mm	Μέγεθος 3	431 303	1000 τεμάχια	12
<u>βαμβάκι και βισκόζη</u>				
διάμετρος 8 mm	Μέγεθος 1	430 181	864 τεμάχια	10
διάμετρος 10 mm	Μέγεθος 2	430 182	600 τεμάχια	10
διάμετρος 12 mm	Μέγεθος 3	430 183	433 τεμάχια	10



Samu-med®

Ταμπόν γυναικολογικά

από βαμβάκι υψηλής ποιότητας με απαλό περίβλημα που προστατεύεται από διχτάκι και φέρει επέκταση σε μορφή κορδονιού. Διαθέτουν ικανότητα γρήγορης απορρόφησης και αξιόπιστη ικανότητα κατακράτησης υγρών. Χάρη στην ανθεκτική επέκταση του διχτυωτού περιβλήματος μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και με ασφάλεια από την ταμποναρισμένη σωματική κοιλότητα.

Χρησιμοποιείται για τον επιπωματισμό σε περίπτωση επεμβάσεων στον γυναικολογικό τομέα.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u>	30 mm Ø, 2 g	444 102	10 τεμάχια	16
<u>μη αποστειρωμένο</u>	20 mm Ø, 1 g	440 241	100 τεμάχια	5
	30 mm Ø, 2 g	440 242	100 τεμάχια	6
	38 mm Ø, 4 g	440 244	100 τεμάχια	1
	45 mm Ø, 6 g	440 246	100 τεμάχια	1

Γάζες ταμποναρίσματος



Tampograss®

Γάζα επιπωματισμού με αλοιφή

που κατασκευάζεται από επιδέσμους επιπωματισμού 24 κλωστών σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 63615-TB. Μπορεί να εμποτιστεί με οποιαδήποτε αλοιφή, και είναι απαλή και ελαστική. Υφίσταται ο ελάχιστος δυνατός κίνδυνος επικόλλησης στο τραύμα, και απομακρύνεται ως εκ τούτου χωρίς να ερεθίζεται η επιφάνεια του τραύματος. Η αλοιφή περιέχει λιπαρό οξύ γλυκερίνης και άμορφο πυριτικό οξύ.

Για τον επιπωματισμό ύστερα από απόφραξη αγγείων της μύτης, τραυματισμό της μύτης, επιδιόρθωση του ρινικού διαφράγματος, για οξείες και χρόνιες πυώδεις φλεγμονές του μέσου ατός που βρίσκονται στη φάση της θεραπείας, για φλεγμονές των παραρρινικών κοιλοτήτων. Είναι δυνατός ο συνδυασμός με αντιβιοτικά ή φάρμακα τοπικής θεραπείας σύμφωνα με τις ενδείξεις.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία Μήκος 5 m	2 cm 4 cm	230 760 230 765	1 συσκευασία 1 συσκευασία	20 20



HARTMANN Tamponadebinden

Γάζα ταμποναρίσματος (επιπωματισμού)

από καθαρό βαμβάκι, σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 61631-TB, 24 κλωστών, με υφασμένες γωνίες.

Χρησιμοποιείται για τον επιπωματισμό φυσικών κοιλοτήτων του σώματος.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Μήκος 5 m</u> <u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία	1 cm 2 cm	370 800 370 801	1 συσκευασία 1 συσκευασία	76 76
<u>μη αποστειρωμένο</u>	1 cm 2 cm 5 cm	370 610 370 611 370 614	10 τεμάχια 10 τεμάχια 10 τεμάχια	50 25 10



Mullro®

Γάζα σε ρολό

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079-VM 20, 20 κλωστών, πλάτους 80 cm. Διατίθεται διπλωμένη 8 φορές έτσι ώστε να έχει πλάτος 10 cm.

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ατομικών επιδέσμων.

Mullro® Box: Dispenser για ρολό Mullro 20 m, προστατεύει το ρολό από τους ρύπους και εξασφαλίζει την απλή και γρήγορη αφαίρεση.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Mullro®	2 m 5m 10m 40 m	209 403 209 405 209 406 209 409	2 m 5 m 10 m 2x20 m	30 12 12 4
Mullro® Box με ρολό 20 m Mullro	πλήρες	209 408	1 τεμάχιο	1



Pehazell®

Φύλλα κυτταρίνης

με ιδιαίτερη απορροφητικότητα, διατίθενται σε διαφορετικές ποιότητες και μεγέθη.

Λευκασμένα χρησιμοποιούνται ως απορροφητικό υλικό για την περιποίηση των τραυμάτων και για τη φροντίδα των ασθενών, ενώ χωρίς λεύκανση χρησιμοποιούνται ως προστατευτικό και καθαριστικό μέσο κατά τη φροντίδα των ασθενών.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Κυτταρίνη</u> λευκασμένη	37x57 cm	273 005	3x5 kg	1
<u>Κυτταρίνη</u> λευκασμένη σε ρολό	36 cm 36 cm	272 715 272 714	500 gr 1000 gr	10 6
<u>Κυτταρίνη</u> μη λευκασμένη σε τεμάχια, από μέγεθος 37x57 cm	18,5x19 cm 18,5x28,5 cm 18,5x37 cm	914 010 914 011 914 012	3x5 kg 3x5 kg 3x5 kg	1 1 1

Επιθέματα με αλοιφή



Grassolind®

Επιθέματα με αλοιφή

από βαμβακερό ύφασμα με αραιή πλέξη και υφή που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υγρών, εμποτισμένα με μία ουδέτερη αλοιφή, δεν προκαλούν ερεθισμούς και αλλεργίες, ακόμα και μετά από μακροχρόνια χρήση.

Γενικά για τη θεραπεία τραυμάτων, π.χ. για εκδορές που καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια, ειδικά σε ασθενείς με ευπαθή επιδερμίδα και ευαισθησία στα φάρμακα.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
αποστειρωμένο ατομική συσκευασία	5x5 cm	499 310	10 τεμάχια	20
		499 350	50 τεμάχια	10
	7,5x10 cm	499 313	10 τεμάχια	12
		499 353	50 τεμάχια	10
	10x10 cm	499 314	10 τεμάχια	12
		499 336	30 τεμάχια	10
σε συσκευασία	17x24 cm	499 460	30 τεμάχια	4



Atrauman®

Επιθέματα με αλοιφή

κατασκευάζονται από υδρόφοβο τούλι από πολυεστέρα, είναι εμποτισμένα με ουδέτερη αλοιφή χωρίς την προσθήκη βαζελίνης ή άλλων παραφινών. Διπλώνονται εύκολα, επιτρέπουν την κυκλοφορία των υγρών, δεν κολλούν στο τραύμα.

Για την ατραυματική περιποίηση του τραύματος σε όλες τις φάσεις της θεραπείας, π.χ. για τραύματα που συνοδεύονται από εκκρίσεις, καθώς και για τραύματα στη φάση της δημιουργίας συνδετικού ιστού και επιθηλίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ασθενείς που έχουν δερματική και φαρμακευτική ευαισθησία.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
αποστειρωμένο ατομική συσκευασία	5x5 cm	499 510	10 τεμάχια	20
		499 550	50 τεμάχια	10
	7,5x10 cm	499 513	10 τεμάχια	10
		499 553	50 τεμάχια	10
	10x20 cm	499 536	30 τεμάχια	10



Atrauman® Ag




Επιθέματα με προσθήκη αργύρου

εμποτισμένα με ουδέτερη αλοιφή που φροντίζει το τραύμα. Οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες που διαθέτει ο άργυρος προφυλάσσουν από μολύνσεις κατά την διάρκεια της θεραπείας και επούλωσης του τραύματος.

Εξασφαλίζουν καλή επαφή με την επιφάνεια του τραύματος και άμεση αντιβακτηριδιακή δράση (μηχανισμός touch and kill). Μπορούν να κοπούν σε κατάλληλα μεγέθη και να χρησιμοποιηθούν σε κοίλα τραύματα. Δεν κολλούν στο τραύμα και ως εκ τούτου αφαιρούνται ανώδυνα.

Για μεμονωμένη ή συνδυασμένη με άλλο επίθεμα αντιβακτηριδιακή δράση σε μολυσμένο τραύμα, ή για προφύλαξη από μολύνσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας και επούλωσης του τραύματος.

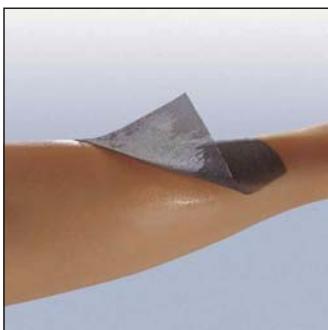

Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο ατομική συσκευασία</u>	5x5 cm	499 570 499 571	3 τεμάχια 10 τεμάχια	12 12
	10x10 cm	499 572 499 573	3 τεμάχια 10 τεμάχια	12 12
	10x20 cm	499 574 499 575	3 τεμάχια 10 τεμάχια	6 6




Επιθέματα ειδικά



TenderWet® 24 active

Επιθέματα υγρής θεραπείας τραύματος

Ιδιαίτερα απορροφητικά, εμποτισμένα και ενεργοποιημένα με ισοτονικό διάλυμα (Ringer), έτοιμα προς χρήση. Δημιουργούν το κατάλληλο υγρό περιβάλλον στο τραύμα για περίπου 24 ώρες. Η μοναδική δράση καθαρισμού - απορρόφησης οδηγεί στον ταχύ, ασφαλή και απαλό καθαρισμό τραυμάτων, διευκολύνοντας την διαδικασία απομάκρυνσης των νεκρών κυττάρων, προετοιμάζοντας ιδανικά τα τραύματα για την διαδικασία της κοκκιοποίησης. Η εξωτερική ριγέ επιφάνεια του επιθέματος αποτρέπει την διέλευση υγρών προς τα έξω. Η εσωτερική λευκή επιφάνεια του δεν επικολλάται στην επιφάνεια των τραυμάτων, συνεπώς η αφαίρεσή του είναι απλή και δεν δημιουργεί ερεθισμούς.

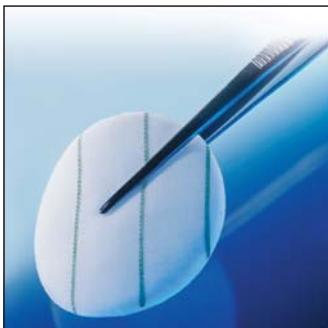

TenderWet® active cavity:

Το σύνολο της επιφάνειάς του είναι υδρόφιλο ώστε να είναι ικανό να απορροφήσει περιμετρικά τις εξιδρώσεις των τραυμάτων, και το ωοειδές σχήμα του το καθιστά ικανό για τον καθαρισμό και την προετοιμασία τραυμάτων με κοιλότητα.

Χρησιμοποιείται για το ταμπονάρισμα βαθιών τραυμάτων, καθώς τα επιθέματα δεν διαθέτουν υδρόφιβο στρώμα και καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή υγρών. Το απόθεμα υγρασίας διαρκεί για περίπου 12 ώρες.

TenderWet® Solution: Ισοτονικό διάλυμα, μη πυρετογόνο, η σύνθεσή του είναι όμοια με αυτή του διαλύματος Ringer. Σε αμπούλες έτοιμες προς χρήση. Απόλυτα ιδανικό για την πλύση τραυμάτων.



Είδη
αποστειρωμένο
ατομική συσκευασία



TenderWet® 24 active:

	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Ø 4 cm	609 823	8 τεμάχια	6	
	609 825	20 τεμάχια	6	
Ø 5,5 cm	609 824	8 τεμάχια	6	
	609 826	20 τεμάχια	6	
4x7 cm	609 827	8 τεμάχια	6	
	609 828	20 τεμάχια	6	
7,5x7,5 cm	609 817	8 τεμάχια	6	
	609 820	20 τεμάχια	6	
10x10 cm	609 819	8 τεμάχια	6	
	609 822	20 τεμάχια	3	
7,5x20 cm	609 818	8 τεμάχια	6	
	609 821	20 τεμάχια	3	

TenderWet® active cavity:

	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Ø 4 cm	609 807	8 τεμάχια	6	
	609 809	20 τεμάχια	6	
Ø 5,5 cm	609 808	8 τεμάχια	6	
	609 810	20 τεμάχια	6	
4x7 cm	609 811	8 τεμάχια	6	
7,5x7,5 cm	609 801	8 τεμάχια	6	
	609 804	20 τεμάχια	6	

TenderWet® Solution:

	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
10 ml	609 491	20 Αμπούλες	50	
15 ml	609 490	20 Αμπούλες	30	
30 ml	609 492	20 Αμπούλες	30	



Sorbalgon®

Επιθέματα αλγινικού ασβεστίου

επιθέματα και κορδόνι από ίνες αλγινικού ασβεστίου χωρίς δραστικές ουσίες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταμπονάρισμα. Με την αλληλεπίδραση του άλατος νατρίου του αίματος και των εκκρίσεων μετατρέπονται σε ένα υδρόφιλο τζελ που δεν κολλάει στο τραύμα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται στενή επαφή με το τραύμα και ένα μικροκλίμα κατάλληλο για τη θεραπεία. Μικροοργανισμοί ενσωματώνονται στη δομή του τζελ κατά τη μετατροπή αυτή.

Χρησιμοποιούνται για την περιποίηση όλων των εξωτερικών τραυμάτων, ειδικότερα σε περίπτωση τραυμάτων που αιμορραγούν και συνοδεύονται από εκκρίσεις, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις ο σχηματισμός του τζελ δρα αυξάνοντας τη θεραπευτική δράση. Έτσι για παράδειγμα σε Ulcus cruris venosum, σε έλκη από κατάκλιση, αποστήματα, δοθιήνες, εγκαύματα καθώς και σε τραύματα που έχουν δυσκολία στην περιποίηση κατά τη χειρουργική θεραπεία τραυμάτων από ατυχήματα και τη χειρουργική αφαίρεση όγκων. Σε περίπτωση ογκωδέστερων και βαθύτερων τραυμάτων διατίθεται το Sorbalgon T.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία				
Επιθέματα Sorbalgon	5x5 cm 10x10 cm 10x20 cm	999 580 999 598 999 584 999 595 999 589	3 τεμάχια 10 τεμάχια 3 τεμάχια 10 τεμάχια 5 τεμάχια	50 20 25 10 14
Sorbalgon T κορδόνι	1 g/30 cm 2 g/30 cm	999 590 999 592	3 τεμάχια 5 τεμάχια	16 10



Επιθέματα ειδικά



PermaFoam™

Επιθέματα αφρώδη

από μαλακό αφρώδες υλικό με αεροδιαπερατή αδιάβροχη και αδιαπέραστη από μικροοργανισμούς επικαλυπτική στρώση πολυουρεθάνης. Απορροφώντας τις εκκρίσεις δημιουργούν ταυτόχρονα ένα υγρό περιβάλλον για το τραύμα που δρα υποστηρικτικά στην θεραπεία του. Είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κολλούν πάνω στο τραύμα ενώ αφαιρούνται ανώδυνα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα.

Για την θεραπεία τραυμάτων, που συνοδεύονται από εκκρίσεις μέσης ή βαριάς έντασης και κατά την δημιουργία κοκκιόδους ιστού, χρονίων τραυμάτων και ελκών. Τέλος ενδείκνυται για την αγωγή εγκαυμάτων έως και β' βαθμού.



PermaFoam™ comfort:

διαθέτει ένα επιπλέον συγκολλητικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη επιπρόσθετα υλικά για τη στερέωση αυτών των επιθεμάτων.

PermaFoam™ sacral:

έχει σχήμα κατάλληλο για την περιοχή του ιερού οστού.

PermaFoam™ concave:

έχει σχήμα κατάλληλο για την περιοχή της φτέρνας και του αγκώνα.

PermaFoam™ cavity:

έχει σχήμα κατάλληλο για βαθιά τραύματα.

PermaFoam™ tracheostomy:

φέρει τομή σχήματος Y, για τραχειοστομία.



Είδη
αποστειρωμένο
ατομική συσκευασία

Μέγεθος Κωδικός Μονάδα Μονάδες/Κιβώτιο

PermaFoam™

Ø 6 cm	409 427	10 τεμάχια	6
10x10 cm	409 401	10 τεμάχια	6
10x20 cm	409 403	5 τεμάχια	6
15x15 cm	409 405	5 τεμάχια	6
20x20 cm	409 406	3 τεμάχια	6



PermaFoam™ comfort

8x8 cm	409 428	10 τεμάχια	6
11x11 cm	409 408	10 τεμάχια	6
10x20 cm	409 410	5 τεμάχια	6
15x15 cm	409 412	5 τεμάχια	6
20x20 cm	409 413	3 τεμάχια	6

PermaFoam™ sacral

18x18 cm	409 422	3 τεμάχια	6
22x22 cm	409 423	3 τεμάχια	6

PermaFoam™ concave

16,5x18 cm	409 424	3 τεμάχια	6
10x10 cm	409 425	3 τεμάχια	12

PermaFoam™ cavity

8x8 cm	409 426	10 τεμάχια	6
10x10 cm	409 425	3 τεμάχια	12





Hydrocoll®

Επιθέματα υδροκολλοειδή

με μεγάλη απορροφητική ικανότητα και ικανότητα άμεσης συγκόλλησης, με ημιπερατό στρώμα επικάλυψης που φέρει στερεό πυρήνα. Χάρη στη μετατροπή των υδροκολλοειδών τμημάτων του πυρήνα του επιθέματος σε τζελ, δημιουργείται ένα υγρό περιβάλλον στο τραύμα και κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία συνδετικού ιστού και επιθηλίου.

Για την υγρή θεραπεία τραυμάτων που συνοδεύονται από εκκρίσεις ελαφράς ή μέσης έντασης, για χρόνια κυρίως τραύματα που δεν έχουν μολυνθεί κλινικά και η επούλωση των οποίων παρουσιάζει δυσκολίες, ή ακόμα και για τη δημιουργία συνδετικού ιστού όπως, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις *Ulcus cruris* ή εξελκώσεων από κατάκλιση. Τέλος ενδείκνυται για τη θεραπευτική αγωγή εγκαυμάτων β' βαθμού.

Hydrocoll®:

κανονική έκδοση σε πέντε μεγέθη.

Hydrocoll® sacral:


με ειδικό σχήμα για την περιοχή του ιερού οστού.

Hydrocoll® concave:

με ειδικό σχήμα για τη φτέρνα και τον αγκώνα.

Hydrocoll® thin:

με μικρή απορροφητική ικανότητα για τραύματα στα οποία έχει ήδη δημιουργηθεί επιθήλιο.

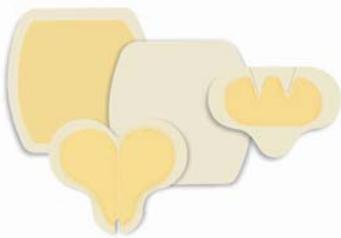

Είδη

Μέγεθος

Κωδικός

Μονάδα

Μονάδες/Κιβώτιο

αποστειρωμένο

ατομική συσκευασία




Hydrocoll®:

5x5 cm	900 740	10 τεμάχια	20
7,5x7,5 cm	900 742	10 τεμάχια	20
10x10 cm	900 747	3 τεμάχια	20
	900 744	10 τεμάχια	20
15x15 cm	900 935	3 τεμάχια	16
	900 748	5 τεμάχια	16
	900 936	10 τεμάχια	16
20x20 cm	900 749	5 τεμάχια	16
	900 937	10 τεμάχια	16

Hydrocoll® sacral

12x18 cm	900 931	3 τεμάχια	16
	900 755	5 τεμάχια	16
	900 932	10 τεμάχια	16

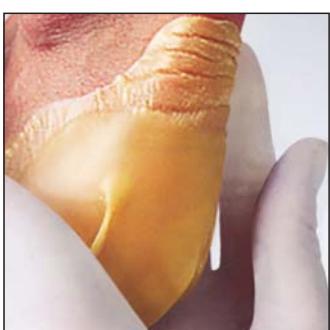

Hydrocoll® concave

8x12 cm	900 930	3 τεμάχια	20
	900 756	10 τεμάχια	20

Hydrocoll® thin

7,5x7,5 cm	900 757	10 τεμάχια	20
10x10 cm	900 759	3 τεμάχια	20
	900 758	10 τεμάχια	20
15x15 cm	900 933	3 τεμάχια	16
	900 760	5 τεμάχια	16
	900 934	10 τεμάχια	16

Επιθέματα ειδικά




Hydrosorb®

Επιθέματα με υδροτζέλ (υδροκυτταρικά)


από απορροφητικό πολυμερές πολυουρεθανίου, με ημιπερατό στρώμα επικάλυψης που φέρει στεγανό πυρήνα, διαφανές. Δημιουργεί αμέσως ένα ισορροπημένο υγρό περιβάλλον για το τραύμα, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό, που ανέρχεται περίπου σε 60%. Επιταχύνει τη δημιουργία ιστού και επιθηλίου.

Το **Hydrosorb® Comfort** φέρει περιμετρικά αυτοκόλλητη διάφανη μεμβράνη για την πλήρη στερέωση του επιθέματος στο τραύμα.

Για την υγρή θεραπεία τραυμάτων, ιδίως για τραύματα που δεν έχουν μολυνθεί κλινικά και δέρχονται το στάδιο δημιουργίας συνδετικού ιστού και επιθήλιου όπως, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις Ulcus cruris ή εξελκώσεων από κατάκλιση. Τέλος ενδείκνυται για την αγωγή εγκαυμάτων έως και β' βαθμού.

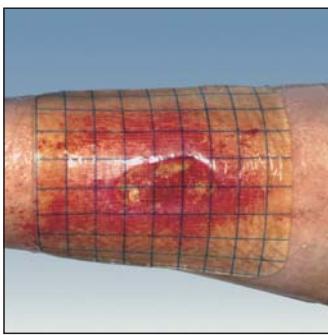

Είδη αποστειρωμένο ατομική συσκευασία	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Hydrosorb®	5x7,5 cm	900 853	5 τεμάχια	6
	10x10 cm	900 854	5 τεμάχια	6
	20x20 cm	900 855	3 τεμάχια	5
Hydrosorb® comfort	4,5x6,5 cm	900 702	5 τεμάχια	12
	7,5x10 cm	900 706	5 τεμάχια	6
	12,5x12,5 cm	900 723	5 τεμάχια	6
	21,5x24 cm	900 729	3 τεμάχια	5

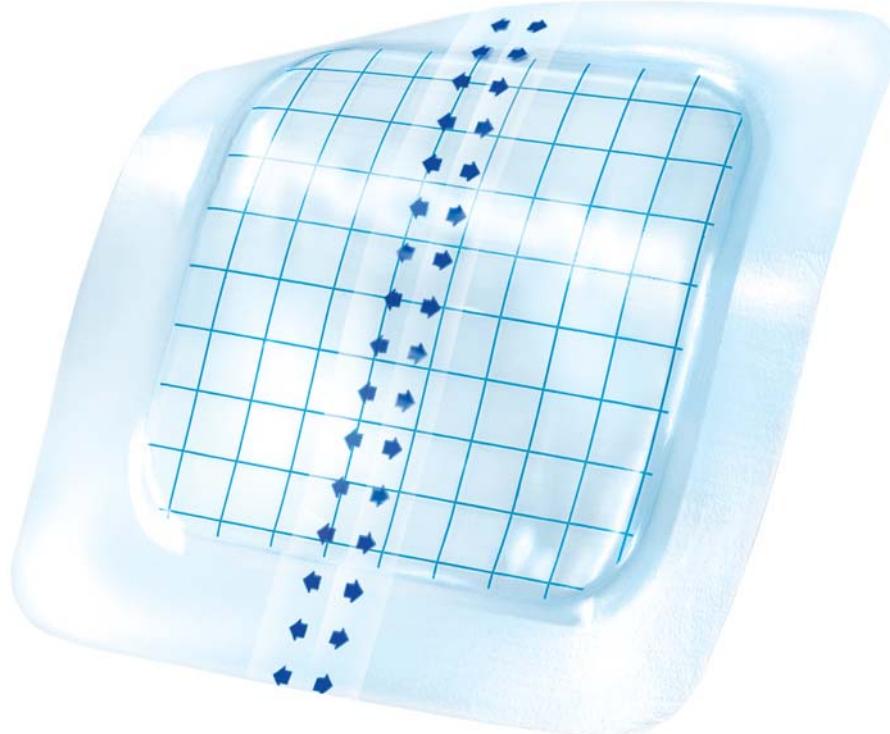



Hydrofilm®

Μεμβράνες διαφανείς (φιλμ)

από ημιπερατή αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης, με στεγανό πυρήνα, με υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό, μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να προκαλέσουν ερεθισμό στο τραύμα.

Χρησιμεύουν ως προστασία από δευτερογενείς μολύνσεις και μηχανικούς ερεθισμούς στεγνών τραυμάτων που έχουν επουλωθεί σε πρώτη φάση, για τραύματα του επιθηλίου που έχουν σχεδόν θεραπευτεί, καθώς επίσης και για τη στερέωση επιθεμάτων, καθετήρα και βελόνης.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία	6x9 cm	900 860	10 τεμάχια	100
		900 861	100 τεμάχια	10
	10x15 cm	900 862	10 τεμάχια	60
		900 863	50 τεμάχια	10
	12x25 cm	900 864	10 τεμάχια	40
		900 865	30 τεμάχια	10



Hydrofilm® Plus

Μεμβράνες διαφανείς (φιλμ) με γάζα

ως απορροφητικά επιθέματα τραύματος που δεν κολλούν στο τραύμα, με ημιπερατή αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης και στεγανό πυρήνα. Η διαφάνειά τους επιτρέπει την παρακολούθηση της περιοχής γύρω από το τραύμα καθώς και της απορροφητικότητας του επιθέματος, με υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό, ενώ αφαιρούνται χωρίς να προκαλούν ερεθισμό του τραύματος.

Για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων που επουλώνονται δύσκολα, για την προστασία από δευτερογενείς μολύνσεις, αλλά και για την αποστειρωμένη περιποίηση μικροτραυμάτων.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u> ατομική συσκευασία	5x7 cm	916 041	5 τεμάχια	100
		916 042	50 τεμάχια	20
	8x12 cm	916 043	30 τεμάχια	20
	12x25 cm	916 044	20 τεμάχια	10

Επιθέματα αυτοκόλλητα



Cosmopor® steril

Επιθέματα αυτοκόλλητα τραύματος

από απαλό μη υφασμένο υλικό (φλις) με προστατευτικό κάλυμμα τραύματος από 100 % βαμβάκι και μικρο-δίχτυ που δεν κολλάει. Διαθέτουν απορροφητική ικανότητα και προσφέρουν μεγάλη άνεση, γρήγορη απορρόφηση των εκκρίσεων χάρη στην παροχετευτική δράση που προσφέρει το μικρο-δίχτυ. Είναι φιλικά προς το δέρμα χάρη στο υποαλλεργικό πολυακριλικό συγκολλητικό υλικό τους.

Για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων, αλλά και για την αποστειρωμένη περιποίηση μικροτραυμάτων.

Cosmopor® E: από απαλό μη υφασμένο υλικό (φλις), με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα. Φέρει ειδική επίστρωση, με υποαλλεργικό, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Cosmopor® steril	7,2x5 cm	900 833	10 τεμάχια	20
<u>αποστειρωμένο</u>	7,2x5 cm	900 800	50 τεμάχια	20
ατομική συσκευασία	10x6 cm	900 802	25 τεμάχια	27
	15x6 cm	900 804	25 τεμάχια	18
	10x8 cm	900 806	25 τεμάχια	22
	15x8 cm	900 808	25 τεμάχια	14
	20x8 cm	900 810	25 τεμάχια	13
	20x10 cm	900 812	25 τεμάχια	12
	25x10 cm	900 814	25 τεμάχια	8
	35x10 cm	900 816	25 τεμάχια	7
Cosmopor® E	7,2x5 cm	900 870	50 τεμάχια	20
	10x6 cm	900 871	25 τεμάχια	27
	15x6 cm	900 872	25 τεμάχια	18
	10x8 cm	900 873	25 τεμάχια	22
	15x8 cm	900 874	25 τεμάχια	14
	20x8 cm	900 875	25 τεμάχια	12
	20x10 cm	900 876	25 τεμάχια	12
	25x10 cm	900 877	25 τεμάχια	8
	35x10 cm	900 878	25 τεμάχια	8

Cosmopor® I.V.

Επιθέματα αυτοκόλλητα στερέωσης βελόνης

από απαλό μη υφασμένο υλικό (φλις) με ειδική επίστρωση. Δεν κολλούν στο τραύμα. Φέρουν επιπλέον ξεχωριστό κάλυμμα ως προστασία για τα σημεία πίεσης του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου, φιλικά προς το δέρμα χάρη στο υποαλλεργικό πολυακριλικό συγκολλητικό υλικό τους.

Για την αποστειρωμένη περιποίηση του τραύματος σε σημεία του σώματος όπου τοποθετήθηκε βελόνη και την ταυτόχρονη στερέωση του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου.



Είδη	Μέγεθος	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>αποστειρωμένο</u>	8x6 cm	900 805	50 τεμάχια	8



Mullbinden - Gauze Bandages

Επίδεσμοι γάζας

σύμφωνα με το πρότυπο DIN 61631-MB-CV/CO, με 20 ίνες, με υφασμένα άκρα.
60% βισκόζη, 40% βαμβάκι.

Για επίδεση στερέωσης κάθε είδους.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 4 m</u> ατομική συσκευασία	4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm	304 031 304 033 304 034 304 035 304 036	1 επίδεσμος 1 επίδεσμος 1 επίδεσμος 1 επίδεσμος 1 επίδεσμος	640 360 320 200 400
<u>μήκος 4 m</u> χύμα σε κουτί	4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm	304 131 304 133 304 134 304 135 304 136 304 137	20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι	32 18 16 10 12 18



Lastotel®

Επίδεσμοι γάζας ελαστικοί

από γκοφρέ πολυαμίδιο και νήματα υφαδιού από φιλικές προς το δέρμα υδρόφιλες ίνες.
Ελαστικότητα περ. 140 %. Μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα χωρίς πτυχώσεις. Αξιόπιστη και αντιολισθητική εφαρμογή. Μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό Α 134 °C).

Για επίδεση στερέωσης κάθε είδους, κυρίως ενδείκνυνται για τις αρθρώσεις καθώς και τα κωνικά και στρογγυλά μέρη του σώματος.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 4 m</u> (τεντωμένοι) χύμα σε κουτί	4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm	310 131 310 133 310 134 310 135 310 136	20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι	8 10 10 6 4
συμπιαγής συσκευασία	6 cm 8 cm 10 cm	310 173 310 174 310 175	100 επίδεσμοι 100 επίδεσμοι 100 επίδεσμοι	8 6 6

Επίδεσμοι στερέωσης



Peha-crepp® E

Επίδεσμοι γάζας ελαστικοί

με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαμβάκι, γκοφρέ διάταξη των ινών, ελαστικότητα περίπου 160 %. Μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα χωρίς πτυχώσεις. Αξιόπιστη και αντιολισθητική εφαρμογή. Μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό Α 134 ° C). 63% βαμβάκι, 37% πολυαμίδιο.

Για επίδεση στερέωσης κάθε είδους, κυρίως ενδείκνυνται για τις αρθρώσεις καθώς και τα κωνικά και στρογγυλά μέρη του σώματος.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 4 m (τεντωμένο)</u>				
σε ατομική συσκευασία	4 cm	303 010	1 επίδεσμος	160
	6 cm	303 011	1 επίδεσμος	200
	8 cm	303 012	1 επίδεσμος	200
	10 cm	303 013	1 επίδεσμος	120
	12 cm	303 014	1 επίδεσμος	80
χύμα σε κουτί	4 cm	303 110	20 επίδεσμοι	8
	6 cm	303 111	20 επίδεσμοι	10
	8 cm	303 112	20 επίδεσμοι	10
	10 cm	303 113	20 επίδεσμοι	6
	12 cm	303 114	20 επίδεσμοι	4
συμπαγής συσκευασία	6 cm	303 151	100 επίδεσμοι	8
	8 cm	303 152	100 επίδεσμοι	6
	10 cm	303 153	100 επίδεσμοι	6

Peha-haft®

Επίδεσμοι αυτοσυγκρατούμενοι ελαστικοί

με διπλή συγκολλητική δράση χάρη στην κρεπ δομή του υφάσματος και τον εμπλουτισμό του με λατέξ. Διαθέτει περ. 85% ελαστικότητα. Μικρή κατανάλωση υλικού χάρη στην ικανότητα που διαθέτει να κολλάει στον εαυτό του. Μόνο λίγες περιστροφές προσφέρουν ασφαλή σταθεροποίηση μεγάλης διάρκειας, χωρίς να κολλάει πάνω στο δέρμα, τις τρίχες ή τα ρούχα. Είναι αεροδιαπέρατοι και φιλική προς το δέρμα.

Για συνεκτικούς επίδεσμους κάθε τύπου, ιδιαίτερα για αρθρώσεις, καθώς και κωνοειδή ή καμπύλα μέρη του σώματος, για τη στερέωση υλικού.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 4 m, (τεντωμένο)</u>				
	4 cm	932 421	1 επίδεσμος	90
	6 cm	932 423	1 επίδεσμος	90
	8 cm	932 424	1 επίδεσμος	120
	10 cm	932 425	1 επίδεσμος	135
	12 cm	932 426	1 επίδεσμος	84



Pehalast®

Επίδεσμοι γάζας ελαστικού

από καθαρό βαμβάκι, με 20 ίνες. Με ιδιαίτερα σφιγμένα τα νήματα στημονιού εμφανίζουν ελαστικότητα περίπου 65 %. Μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα χωρίς πτυχώσεις. Αξιόπιστη και αντιολισθητική εφαρμογή. Μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό Α 134 ° C), 100% βαμβάκι.


Για επίδεση στερέωσης κάθε είδους, κυρίως ενδείκνυνται για τις αρθρώσεις καθώς και τα κωνικά και στρογγυλά μέρη του σώματος, αποστειρωμένοι. Χρησιμοποιούνται και ως άμεσο προστατευτικό κάλυμμα τραύματος, π.χ. στη χειρουργική χειρός.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
μήκος 4 m (τεντωμένοι) χύμα σε κουτί	4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm	931 548 931 543 931 544 931 545 931 546	20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι 20 επίδεσμοι	8 13 10 8 7
μήκος 4 m ατομική συσκευασία	4 cm 6 cm 8 cm 10 cm	931 521 931 523 931 524 931 525	1 επίδεσμος 1 επίδεσμος 1 επίδεσμος 1 επίδεσμος	160 200 200 120



Σωληνωτοί επίδεσμοι

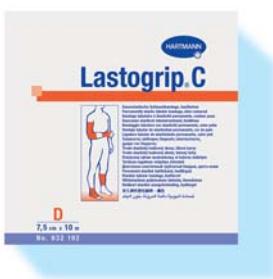

Lastogrip®

Επίδεσμοι σωληνωτοί μεγάλης ελαστικότητας

ασκούν πίεση μέσης ισχύος. Τοποθετούνται απλά και γρήγορα χωρίς βοηθητικά μέσα. Κατά την εφαρμογή τους δεν δημιουργούν πτυχώσεις. Μπορούν να απομακρυνθούν και να τοποθετηθούν εκ νέου όσες φορές το επιθυμείτε. Είναι φιλικοί προς το δέρμα χάρη στο υψηλό ποσοστό βάμβακος που περιέχουν. Πλένονται σε έως και 60 °C, μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό A 134 °C).

85% βαμβάκι, 10% ρεγιόν, 5% πολυαμίδιο.

Χρησιμοποιούνται ως επίδεσμοι στερέωσης που ασκούν μεγαλύτερη συμπίεση, π.χ. για επεμβάσεις στο θώρακα και στην κοιλιακή χώρα. Χρησιμοποιούνται για επίδεση έπειτα από επεμβάσεις μαστού, για μεγάλα επιφανειακά τραύματα ώστε να προληφθεί η δημιουργία οιδήματος στις άκρες του τραύματος ή για την ανακούφιση του τραύματος. Χρησιμεύουν επίσης ως επίδεσμοι στήριξης και ανακούφισης σε βλάβες του συστήματος στήριξης και του κινητικού συστήματος, και ως θερμοί επίδεσμοι στήριξης σε περιπτώσεις αρθρίτιδας κλπ.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Ρολά μήκους 10 m Λευκοί</u>				
Πλάτους 4,2 cm, παιδικοί επίδεσμοι χειριών & βραχίονα	A	932 170	1 ρολό	11
Πλάτους 6,25 cm, για μικρούς επιδέσμους χειριών, βραχίονα και πατούσας	B	932 171	1 ρολό	8
Πλάτους 6,75 cm, για μεσαίους μεγέθους επιδέσμους χειριών, βραχίονα, πατούσας & κνήμης	C	932 172	1 ρολό	7
Πλάτους 7,5 cm, για μεγάλους μεγέθους επιδέσμους χειριών, βραχίονα, πατούσας, κνήμης	D	932 173	1 ρολό	7
Πλάτους 8,75 cm, επίδεσμοι ποδιών, μεγάλοι επίδεσμοι βραχίονα και μικροί μηρών	E	932 174	1 ρολό	6
Πλάτους 10 cm, επίδεσμοι ποδιών και μηρών	F	932 175	1 ρολό	5
Πλάτους 12 cm, για μεγάλους μεγέθους επιδέσμους μηρών	G	932 176	1 ρολό	4
Πλάτους 17,5 cm, για μικρούς μεγέθους επιδέσμους κορμού	J	932 177	1 ρολό	3
Πλάτους 21,5 cm, για μεσαίους μεγέθους επιδέσμους κορμού	K	932 178	1 ρολό	4
Πλάτους 32,5 cm, για μεγάλους μεγέθους επιδέσμους κορμού	L	932 179	1 ρολό	3
Πλάτους 37,5 cm, για ιδιαίτερα μεγάλους επιδέσμους κορμού	M	932 180	1 ρολό	2



Στο χρώμα του δέρματος (Lastogrip C)

Χρησιμοποιούνται όπως οι λευκοί επίδεσμοι



A	932 190	1 ρολό	11
B	932 191	1 ρολό	8
C	932 192	1 ρολό	7
D	932 193	1 ρολό	7
E	932 194	1 ρολό	6
F	932 195	1 ρολό	5
G	932 196	1 ρολό	4



Stülp® Rolls

Επίδεσμοι σωληνωτοί

χωρίς ραφές με μεγάλη κατά μήκος και εγκάρσια ελαστικότητα. Τοποθετούνται απλά χωρίς τη χρήση βοηθητικών μέσων, κατά την εφαρμογή τους δεν σχηματίζονται πτυχώσεις. Χάρη στην κλειστή τους επιφάνεια δεν χαλαρώνουν ακόμα κι αν υποστούν μηχανική επιβάρυνση για την αποτελεσματική προστασία των τραυμάτων ή των ευαίσθητων σημείων του σώματος. Είναι απορροφητικοί και επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα. Μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό A 134 ° C). 70% Βισκόζη, 30% βαμβάκι.

Σαν επίδεσμος στερέωσης κάθε είδους και μεγέθους, ακινητοποίησης (επίδεσμος Desault) και έκτασης. Για την τοποθέτηση ως υπόστρωμα ή για την κάλυψη επιδέσμων ψευδαργύρου ή γυψεπιδέσμων. Με προστατευτική επένδυση για τη συντηρητική αγωγή τραυμάτων. Για την κάλυψη ναρθήκων και βαμβακερών προστατευτικών καλυμμάτων.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Ρολά μήκους 15 m</u>				
Πλάτους 1,5 cm, παιδικοί επίδεσμοι δαχτύλων των πάνω και κάτω άκρων	O R	427 110	1 ρολό	20
Πλάτους 2, 5 cm, επίδεσμοι δαχτύλων	1 R	427 111	1 ρολό	24
Πλάτους 6 cm, επίδεσμοι χεριών, παιδικοί επίδεσμοι ποδιών και πατούσας	2 R	427 112	1 ρολό	32
Πλάτους 8 cm, επίδεσμοι κεφαλής, πατούσας και ποδιών, παιδικοί επίδεσμοι κεφαλής και μασχάλης	3 R	427 113	1 ρολό	28
Πλάτους 10 cm, επίδεσμοι κεφαλής, ποδιών και μασχάλης, μάσκες	4 R	427 114	1 ρολό	14
Πλάτους 12 cm, παιδικοί επίδεσμοι κορμού, επίδεσμοι κεφαλής, μηρών, μασχάλης, επίδεσμος έκτασης	5 R	427 115	1 ρολό	12
<u>Ρολά μήκους 6 m</u>				
Πλάτους 15 cm, παιδικοί επίδεσμοι κορμού και επίδεσμοι μηρών	6 R	427 146	1 ρολό	10
Πλάτους 21 cm, επίδεσμοι Desault, κορμού και ιδιαιτέρως μεγάλοι επίδεσμοι μηρών	7 R	427 147	1 ρολό	16
Πλάτους 21 cm, επίδεσμοι Desault και κορμού	8 R	427 148	1 ρολό	10



Σωληνωτοί επίδεσμοι



Coverflex®

Επίδεσμοι σωληνωτοί ελαστικότητας/δερματολογικοί

φιλικοί προς το δέρμα. Κατασκευάζονται από μεταξοειδές συμπαγές υλικό. Έχουν ενσωματωμένο νήμα ελαστάν για ασφαλή εφαρμογή. Τοποθετούνται απλά και γρήγορα χωρίς βοηθητικά μέσα. Δεν επιτρέπουν τη διαρροή των αλοιφών, προστατεύουν τα λευκά είδη και τα ενδύματά. Έχουν υφασμένες λωρίδες χρώματος για επισήμανση του μεγέθους.

91% Βισκόζη, 5% πολυαμίδιο, 4% ελαστάν.


Ως υγροί επίδεσμοι για την θεραπεία του λιπώματος κατά την οξεία φάση του ατοπικού εκζέματος, ενώ χρησιμοποιούνται ως στεγνοί επίδεσμοι κατά τη χρόνια φάση του για την κάλυψη των αλοιφών και των κρεμών που τοποθετούνται στο ευαίσθητο δέρμα που φέρει έκζεμα.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Ρολά μήκους 10 m</u>				
Πλάτους 3,5 cm, παιδικοί επίδεσμοι χεριών και πατούσας	No 1, κόκκινο	932 570	1 ρολό	36
Πλάτους 5 cm, παιδικοί επίδεσμοι ποδιών και επίδεσμοι βραχίονα	No 2, πράσινο	932 571	1 ρολό	24
Πλάτους 7,5 cm, παιδικοί επίδεσμοι κεφαλής, επίδεσμοι βραχίονα και κνήμης	No 3, μπλε	932 572	1 ρολό	18
Πλάτους 10,75 cm, παιδικοί επίδεσμοι κεφαλής, κορμού, επίδεσμοι κεφαλής & ποδιών	No 4, κίτρινο	932 573	1 ρολό	18
Πλάτους 17,5 cm, επίδεσμοι κορμού	No 5, μπεζ	932 574	1 ρολό	12
<u>Dispenser</u> Συσκευασία που περιέχει Coverflex® Μέγ. 1-5		932 575	1 τεμάχιο	8

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

HARTMANN

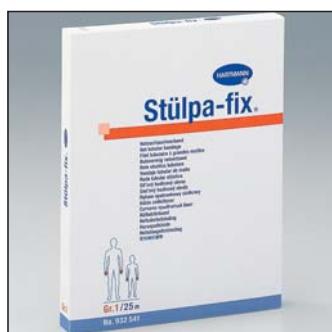

Stülp® fix

Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνωτοί

μεγάλης ελαστικότητας με υψηλό ποσοστό βάμβακος. Για την εφαρμογή τους δεν είναι απαραίτητες περίπλοκες τεχνικές, μπορούν να τοποθετηθούν απλά και γρήγορα. Ασφαλής στερέωση μεγάλης διάρκειας. Μπορούν να κοπούν όπου το επιθυμείτε χωρίς να καταστραφούν και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα. Μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό A 134° C).

68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο, 8% πολυουρεθάνη.

Για επίδεση στερέωσης κάθε είδους και μεγέθους. Για τη στερέωση προστατευτικού υλικού κάλυψης σε σημεία του σώματος που κινδυνεύουν εξαιτίας της άσκησης πίεσης.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Τεντωμένος έχει μήκος 25 m</u>				
Για δάχτυλα	1	932 541	1 ρολό	16
Για χέρι, βραχίονα, παιδική πατούσα & πόδι	2	932 542	1 ρολό	10
Για πατούσα, πόδι, παιδική κεφαλή	3	932 543	1 ρολό	8
Για κεφάλι, παιδικό κορμό	4	932 544	1 ρολό	5
Για τον κορμό	5	932 545	1 ρολό	4
Για κορμό μεγάλου μεγέθους	6	932 546	1 ρολό	3
Για κορμό πολύ μεγάλου μεγέθους	7	932 547	1 ρολό	3



Stülp® ready for use

Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνωτοί έτοιμοι για χρήση

έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα ρολά Stülpfix® είναι όμως έτοιμοι για εφαρμογή, σε ιδανικό μεγέθος, τυλιγμένοι σε ρολά.

Χρησιμοποιούνται ως επίδεσμοι στερέωσης για κοινά τραύματα.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Σε dispenser</u>				
Επίδεσμοι δαχτύλων	1	427 261	50 τεμάχια	12
Επίδεσμοι πατούσας, παιδικοί επίδεσμοι κεφαλής και επίδεσμοι μασχάλης	3	427 253	10 τεμάχια	33
Επίδεσμοι κεφαλής και μασχάλης	4	427 254	10 τεμάχια	24

Ζώνες στήριξης, Ταινίες στερέωσης



Verba®

Ζώνες μετεγχειρητικές στήριξης

πλάτους 25 cm, με αυτοκόλλητη ταινία Velcro. Η κατά μήκος ελαστικότητα και η εγκάρσια σταθερότητά τους προσφέρουν την εξισορροπημένη επίπεδη κατανομή της πίεσης. Δεν επηρεάζεται η αναπνοή. Ασφαλής εφαρμογή χωρίς να δημιουργούνται πτυχές ή κύματα. Τοποθετούνται απλά και χάρη στην αυτοκόλλητη ταινία Velcro διευκολύνεται η αλλαγή του επιθέματος στο τραύμα. Υφασμένες λωρίδες χρώματος για επισήμανση του μεγέθους. Είναι καλά ανεκτές από το δέρμα, επιτρέπεται η διέλευση του αέρα και μπορούν να πλυσθούν στους 100 °C.

Για την μετεγχειρητική φροντίδα έπειτα από εγχειρήσεις θώρακος ή κοιλίας, για την ανακούφιση των τραυμάτων, την αποτροπή ρήξης των ραμμάτων και για την πρώιμη μετακίνηση του ασθενούς.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Διαστάσεις 65-75 cm	Μέγ. 1	932 531	1 τεμάχιο	15
Διαστάσεις 75-85 cm	Μέγ. 2	932 532	1 τεμάχιο	15
Διαστάσεις 85-95 cm	Μέγ. 3	932 533	1 τεμάχιο	15
Διαστάσεις 95-105 cm	Μέγ. 4	932 534	1 τεμάχιο	15
Διαστάσεις 105-115 cm	Μέγ. 5	932 535	1 τεμάχιο	15

Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Verba® E				
Διαστάσεις 65-95 cm	Μέγ. 1	932 536	1 τεμάχιο	15
Διαστάσεις 95-115 cm	Μέγ. 2	932 537	1 τεμάχιο	15

Omniplast®

Ταινίες αυτοκόλλητες υφασμένες

στο χρώμα του δέρματος με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του νερού και των υδρατμών, κολλούν με ασφάλεια, είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Αφαιρούνται χωρίς πρόβλημα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζίγκ-ζάγκ.

Για τη τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με κανονική επιδερμίδα.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Σε πλαστικό κύλινδρο μήκος 5 m	1,25 cm 2,50 cm 5 cm 7,50 cm	900 440 900 441 900 442 900 533	1 ρολό 1 ρολό 1 ρολό 1 ρολό	300 240 120 72
μήκος 10 m, λευκό	10 cm	900 477	5 ρολά	12
μήκος 9,2 m	1,25 cm 2,50 cm 5 cm	900 427 900 428 900 429	20 ρολά 20 ρολά 10 ρολά	12 12 12

Συσκευασία Φαρμακείου

Σε πλαστικό κύλινδρο μήκος 5 m, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα

1,25 cm 2,50 cm 5 cm	900 530 900 531 900 532	1 ρολό 1 ρολό 1 ρολό	300 240 120
----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------



Omnisilk®

Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι

λευκού χρώματος, με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζιγκ-ζαγκ.

Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Σε πλαστικό κύλινδρο <u>μήκος 5 m</u>	1,25 cm	900 430	1 ρολό	300
	2,50 cm	900 431	1 ρολό	240
	5 cm	900 432	1 ρολό	120
<u>μήκος 9,2 m</u>	1,25 cm	900 418	1 ρολό	300
	2,50 cm	900 419	1 ρολό	240
	5 cm	900 420	1 ρολό	120
Συσκευασία Φαρμακείου Σε πλαστικό κύλινδρο <u>μήκος 5 m</u> , με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα	1,25 cm	900 500	1 ρολό	360
	2,50 cm	900 501	1 ρολό	240
	5 cm	900 502	1 ρολό	120

Omnipor®

Ταινίες αυτοκόλλητες μη υφασμένες (χάρτινες)

από λευκό μη υφασμένο υλικό φλις με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών, κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα.

Για την επικάλυψη και την τοποθέτηση επιδέσμων σε ασθενείς με υπερευαίσθητη επιδερμίδα και σε ιδιαίτερα ευαίσθητα μέρη του σώματος.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Σε πλαστικό κύλινδρο <u>μήκος 5 m</u>	1,25 cm	900 436	1 ρολό	300
	2,50 cm	900 437	1 ρολό	240
	5 cm	900 438	1 ρολό	120
<u>μήκος 9,2 m</u>	1,25 cm	900 424	1 ρολό	300
	2,50 cm	900 425	1 ρολό	240
	5 cm	900 426	1 ρολό	120
Συσκευασία Φαρμακείου Σε πλαστικό κύλινδρο <u>μήκος 5 m</u> , με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα	1,25 cm	900 550	1 ρολό	360
	2,50 cm	900 551	1 ρολό	240
	5 cm	900 552	1 ρολό	120

Ταινίες στερέωσης




Omnifilm®

Ταινίες αυτοκόλλητες πορώδεις - πλαστικές

από πορώδεις λεπτό διαφανές φύλλο με υποαλλεργική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών, κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, εμποδίζουν τη διείσδυση ρύπων, κόβονται εύκολα τόσο σε οριζόντια, όσο και σε κάθετη κατεύθυνση.

Για τη διάφανη τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα.

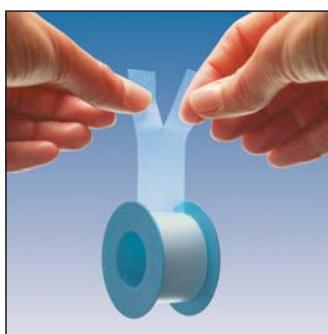

Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Σε πλαστικό κύλινδρο <u>μήκος 5 m</u>	1,25 cm 2,50 cm 5 cm	900 433 900 434 900 435	1 ρολό 1 ρολό 1 ρολό	300 240 120
<u>μήκος 9,2 m</u>	1,25 cm 2,50 cm 5 cm	900 421 900 422 900 423	1 ρολό 1 ρολό 1 ρολό	300 240 120
Συσκευασία Φαρμακείου Σε πλαστικό κύλινδρο <u>μήκος 5 m, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα</u>	1,25 cm 2,50 cm 5 cm	900 520 900 521 900 522	1 ρολό 1 ρολό 1 ρολό	360 240 120

Omnitape®

Ταινίες αυτοκόλλητες συγκράτησης

από λευκό ρεγιόν με κόλλα από οξείδιο του ψευδαργύρου, ιδιαίτερα ανθεκτικές και μη ελαστικές, με μεγάλη ικανότητα συγκόλλησης. Χάρη στις οδοντωτές άκρες τους κόβονται εύκολα με το χέρι.

Για λειτουργικούς επιδέσμους. Χρησιμεύει για τη στήριξη και την αποφόρτιση τραυματισμένων μυών, καθώς και για την προφύλαξη και προπόνηση στην αθλητική ιατρική.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
Σε πλαστικό κύλινδρο <u>μήκος 10 m,</u>	2 cm 3,75 cm 5 cm	500 058 500 059 500 060	1 ρολό 1 ρολό 1 ρολό	96 96 48



Omnifix® elastic

Ταινίες αυτοκόλλητες ελαστικές

υποαλλεργικές ταινίες στερέωσης, από μη υφασμένο υλικό (φλις) με συγκολλητική ουσία από συνθετικό καουτσούκ. Ιδιαίτερα απαλές και εύκαμπτες. Διαθέτουν εγκάρσια ελαστικότητα. Είναι διαπερατές από τον αέρα και τους υδρατμούς. Δεν χρειάζονται έμβρεξη. Εφαρμόζουν με ασφάλεια, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Αποστειρώνονται αν δεχτούν ακτινοβολία. Είναι ακτινοδιαπερατές.

Για την στερέωση ολόκληρης της επιφάνειας των επιθεμάτων τραύματος. Ενδείκνυνται ιδιαίτερα για αρθρώσεις, κινητά και κωνοειδή μέρη του σώματος. Για τη στερέωση οργάνων μέτρησης, καθετήρων και βελόνων. Ιδανικές και για ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα.

Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>μήκος 2 m</u>	10 cm	900 601	1 ρολό	24
<u>μήκος 10 m.</u> Σε dispenser	2,50 cm 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 30 cm	900 606 900 602 900 603 900 604 900 605 900 607	2 ρολά 1 ρολό ¹ 1 ρολό ¹ 1 ρολό ¹ 1 ρολό ¹ 1 ρολό ¹	60 60 32 20 16 10
Omnifix® E <u>μήκος 10 m.</u> Σε dispenser	10 cm 15 cm 20 cm	900 650 900 651 900 652	1 ρολό ¹ 1 ρολό ¹ 1 ρολό ¹	32 20 16



Omnistrip®

Ταινίες αυτοκόλλητες σύγκλισης τραύματος

κατασκευάζονται από μη υφασμένο υλικό (φλις) στο χρώμα του δέρματος και φέρουν πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. Με αποστρογγυλεμένες γωνίες. Είναι διαπερατές από τον αέρα και τους υδρατμούς. Δεν χρειάζονται έμβρεξη. Εφαρμόζουν με ασφάλεια, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Είναι ακτινοδιαπερατές, ανθεκτικές στο χρόνο και τη θερμοκρασία.

Για την ατραυματική επανόρθωση τραυμάτων και για χειρουργικές τομές τραυμάτων που έχουν επουλωθεί σε πρώτη φάση. Για την αποσυμφόρηση των άκρων του τραύματος από την έλκυση και τη σταθεροποίηση των καινούριων ραμμάτων.



Είδη	Μεγέθη	Κωδικός	Μονάδα	Μονάδες/Κιβώτιο
<u>Αποστειρωμένες</u>				
Συσκευασία 1X5 τεμάχια	3x76 mm	540 681	50 συσκευασίες	6
Συσκευασία 1X6 τεμάχια	6x38 mm	540 682	50 συσκευασίες	6
Συσκευασία 1X3 τεμάχια	6x76 mm	540 683	50 συσκευασίες	6
Συσκευασία 2X5 τεμάχια	6x101 mm	540 684	50 συσκευασίες	6
Συσκευασία 2X3 τεμάχια	12x101 mm	540 685	50 συσκευασίες	6
Συσκευασία 2X2 τεμάχια	25x127 mm	540 686	50 συσκευασίες	6